

# Bedienungsanleitung für Roger Pass-around Handmikrofon (Sprechentfernung ca. 5-10 cm )



<b>1</b>	Ein-/Aus-Schalter
<b>2</b>	Lautstärkereglер (+/-)
<b>3</b>	Mikrofontaste: Zum Stummschalten oder zur Aktivierung der Übertragung bei Push-To-Talk (PTT)

<b>Bedeutung der farbigen Statusanzeigen</b>	<p>grün: Übertragung des Sprechers</p> <p>orange: Standby im PTT-Modus</p> <p>blaues Blinken: Mikrofon muss mit Connect mit dem Sender verbunden werden</p> <p>rotes Blinken: Mikrofon wurde mit der Mikrofontaste stumm geschaltet</p>
<b>Reset (neu starten)</b>	Mikrofontaste und An-/Aus-Schalter gleichzeitig mind. 8 Sekunden gedrückt halten.
<b>Push-To-Talk (PTT)</b>	<p>Das Mikro überträgt Äußerungen nur, wenn die Mikrofontaste (3) gedrückt gehalten wird.</p> <p>Diese Funktion muss über den Touchscreen Mic-Sender eingestellt werden: Einstellungen → Push-To-Talk (PTT) → „Acivated“ antippen (Haken erscheint)</p>
<b>Buch vorlesen mit Push-To-Talk (PTT)</b>	<p>Damit das Mikrofon beim Vorlesen genutzt werden kann, ohne es gleichzeitig in der Hand halten zu müssen, muss die PTT-Funktion aktiviert werden (siehe oben).</p> <p>Das Mikrofon wird im Ständer befestigt und mit einem Abstand von 30-40 cm zum Sprecher auf dem Tisch positioniert. Die Mikrofontaste muss länger als 1 Sekunde gedrückt gehalten werden. Es erscheint ein grünes Signal.</p> <p>Nach dem Vorlesen muss die Mikrofontaste erneut kurz gedrückt werden, um die Übertragung wieder abzuschalten.</p>
<b>Lautstärke des Mikrofons anpassen und Stummschalten</b>	<p>Diese Funktionen sind deaktiviert, damit sie nicht versehentlich beim Herumreichen gedrückt werden können. Sollen diese Funktionen zum Einsatz kommen, müssen diese mithilfe des Roger Touchscreen Mic-Sender aktiviert werden: Einstellungen → Roger Pass-around → Lautstärketasten (Sperren/Entsperren) bzw. Automatische Stummschaltung (Aktivieren/Deaktivieren) bzw. Stummschalttaste (Aktivieren/Deaktivieren).</p>

Bildquelle:

[https://www.phonak.com/content/phonak/de/de/hearing-aids/accessories/roger-touchscreenmic/\\_jcr\\_content/mainpar/contentcontainer\\_be1/contentpar/contentimage\\_a500/image.transform/w470-normal/image.jpg](https://www.phonak.com/content/phonak/de/de/hearing-aids/accessories/roger-touchscreenmic/_jcr_content/mainpar/contentcontainer_be1/contentpar/contentimage_a500/image.transform/w470-normal/image.jpg), abgerufen am 07.03.2019